

CÁNULAS EASYGRIP®

CÁNULAS DE ASPIRACIÓN

Dispositivos no reutilizables



AMEU es la 1ª opción para la evacuación uterina instrumentada segura,

recomendada por:



CÁNULAS EASYGRIP

CÁNULAS EASYGRIP®

CÁNULAS DE ASPIRACIÓN

Registro: 1461E2015 SSA
 Caducidad de blíster: 5 años
 Medidas del dispositivo: 24 cm de largo aprox.
 Categoría: Equipo médico quirúrgico



DISPOSITIVOS NO REUTILIZABLES

Dispositivos utilizados para el procedimiento de Aspiración Manual Endouterina (AMEU)

Características:

- Hechas de plástico de polipropileno sin látex
- Desechables**
- Semirrígidas
- Empaque individual esterilizado
- Base con aletas integradas, diferenciadas por colores
- Pautas de inserción impresa
- Disponible en 8 diámetros: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 12 mm
- Cánulas de 4 a 8 mm con dos aberturas opuestas
- Cánulas de 9, 10 y 12 mm con una abertura mayor

Indicaciones:

- Tratamiento de abortos incompletos de hasta 12 semanas de edad gestacional
- Evacuación endouterina por:
 - Aborto incompleto
 - Embarazo anembrionario
 - Mola hidatiforme
 - Retención de restos placentarios
 - Aborto diferido
- Biopsia de endometrio

Contraindicaciones: No se conoce alguna

Recomendaciones:

Utilizar una cánula del tamaño adecuado a la dilatación del cuello uterino. Si se utiliza una cánula demasiado pequeña, podría ocurrir una retención de tejidos o la pérdida de succión

Disponible en 8 diámetros:



Tamaños de cánulas recomendados de acuerdo a la altura uterina:

Tamaño uterino (semanas desde la FUM*)	Tamaño de la cánula
4 a 6 semanas	Cánulas de 4 a 7 mm
7 a 9 semanas	Cánulas de 5 a 10 mm
9 a 12 semanas	Cánulas de 8 a 12 mm
Para biopsia del endometrio: Cánulas de 3 mm o de 4 mm	

*FUM: Fecha de la Última Menstruación
 Referencias: Manual de Práctica Clínica para un Aborto Seguro, OMS 2014.

Se recomienda utilizar las cánulas EasyGrip con el aspirador MVA Plus (jeringa con volumen de 60 cc).

Clave de Cuadro básico:

- 4 mm. Amarillo 060.166.0558
- 5 mm. Verde 060.166.0566
- 6 mm. Azul 060.166.0574
- 7 mm. Café 060.166.0582
- 8 mm. Blanco 060.166.0590
- 9 mm. Café oscuro 060.166.0608
- 10 mm. Verde oscuro 060.166.0616
- 12 mm. Azul oscuro 060.166.0624

La compra de estos productos permite a DKT continuar con campañas de Planificación Familiar, prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y reducción de la Mortalidad Materna para proteger a millones de personas alrededor del mundo.

